

Helioseal®

**Матеріал світлового отвердження на основі пластмас
для запечатування фісур**

Інструкція з використання



UA.TR.101

Уповноважений Представник в Україні:
Представництво "Івоклар Вівадент Маркетинг Лімітед"
Адреса: вул. Дніпровська Набережна, буд. 23/А, офіс 8
02098, м. Київ, Дарницький район, Україна
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
Тел. + 38 (0) 44 219-40-30

ТІЛЬКИ Rx

Дата складання інформації:
557037/2013-12-05/WE3/Перегляд 1

CE 0123



ВИРОБНИК:
"Івоклар Вівадент АГ"
FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent:
clinical

Опис

Helioseal® - це матеріал світлового отвердження білого кольору для запечатування фісур.

Склад

Helioseal складається з Bis-GMA і триетиленглікольдіметакрипату (>97% за вагою), а також діоксиду титану (2% за вагою). Додатково в матеріалі містяться стабілізатори й каталізатори (<1% за вагою).

Показання

Helioseal призначений для запечатування фісур, западин і Foramina Caesa.

Протипоказання

- при відомій алергії на один або декілька компонентів матеріалу, від нанесення Helioseal слід відмовитися.
- покриття матеріалом Helioseal протипоказане, якщо неможливий контроль над сухістю робочого поля.

Побічні дії


В окремих випадках застосування може привести до контактної алергії. Систематичні побічні явища на теперішній час не відомі.

Взаємодія з іншими матеріалами


На теперішній час не відомі.

Застосування


Перед використанням пляшечку з Helioseal сильно струснути. Пляшечку відкривати безпосередньо перед використанням матеріалу, оскільки при потраплянні світла в пляшечку може відбутися полімеризація матеріалу.

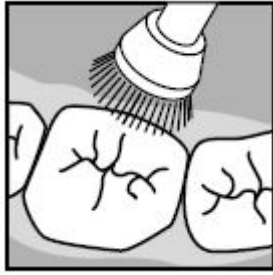


1. Области емалі, на які передбачається наносити Helioseal, ретельно почистити.

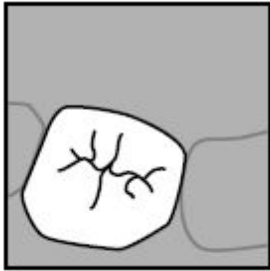


2. Забезпечити сухість робочого поля. Рекомендовано використати коффердам.

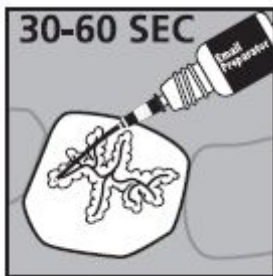


3. Нанести протравлювальний гель, наприклад, Email Preparator. Час дії від 30 до 60 сек.

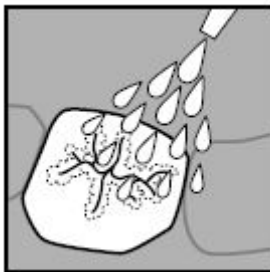


4. Ретельно промити.

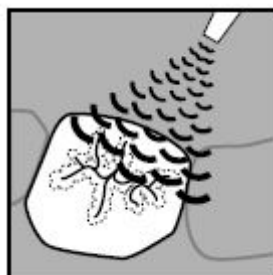


5. Підсушити повітрям, що не містить домішок води й мастила; протравлена емаль має білий матовий колір; уникати забруднення слиною поверхні, на яку передбачається наносити матеріал.

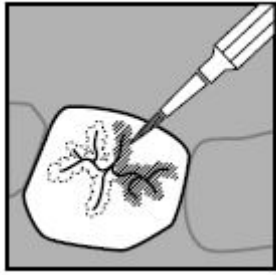

6. Helioseal витягти прямо з одноразової канюлі або нанести за допомогою пензлика, розподілити по поверхні.

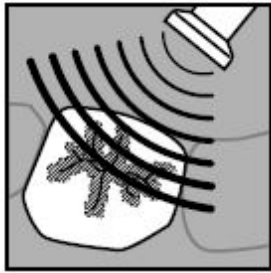

7. Приблизно через 15 сек. полімеризувати відповідною лампою (наприклад, Bluephase®) протягом 20 сек.

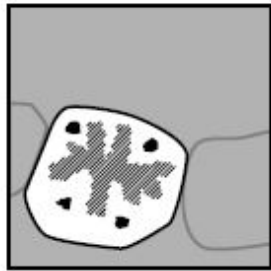

8. Перевірити запечатану поверхню й оклюзію.

Рекомендація

Для оптимального захисту, після запечатування виконати локальне фторування (наприклад, за допомогою Fluor Protector)

Запобіжні заходи

Уникати контакту неpolімеризованого матеріалу зі шкірою/слизовою оболонкою й очами. У неотвердженому стані Helioseal може мати легку подразнювальну дію, а в рідких випадках привести до виникнення чутливості на метакрилати. Звичайні медичні рукавички не забезпечують захисту від сенсibiliзуючої дії метакрилатів.

Умови зберігання

- Пляшечку з Helioseal після використання відразу ж ретельно закрити
- Температура зберігання 2-28°C.
- Строк придатності: див. дату на етикетці
- Після закінчення строку придатності не використовувати

Зберігати в місці, недоступному для дітей!
Для використання тільки в стоматології!

Продукт був розроблений для застосування в стоматології й підлягає використанню тільки відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за застосування в інших цілях або за використання, не відповідне інструкції. Крім того, споживач зобов'язаний під свою відповідальність перевірити продукт перед його використанням на відповідність і можливість застосування для поставлених цілей, якщо ці цілі не вказані в інструкції з використання.